

# TOMORROW

neinvazívny prenatálny test

## POKYNY NA ODBER VZORKY

Pred odberom krvnej vzorky si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.

### POSTUP

1. Vykonať odber venózneho krvi kedykoľvek počas dňa do skúmavky **Streck** (ref.: Cell-Free DNA BCT® CE), ktorú si objednáte na <https://www.alphamedical.sk/objednanie-odberoveho-materialu> pod číslom ST-230244 s názvom Cell-Free DNA BCT CE 10.0ml, glass.
2. Označte skúmavku Streck **najmenej 3 identifikačnými údajmi**, a to menom, priezviskom a rodným číslom pacientky a čiarovým kódom Alpha medical, ktorý si, prosím, objednáte na <https://www.alphamedical.sk/objednanie-odberoveho-materialu> ako 026 Dvojkódy štandardné.
3. Vydezinfikujte miesto odberu vzorky a pomocou napichnutia žily odoberte **7 až 10 ml** krvi do skúmavky Streck.
4. Okamžite po odbere skúmavku opatrne prevráťte 8- až 10-krát (nedostatočné alebo oneskorené premiešanie môže ovplyvniť výsledok testu).
5. Skúmavka sa musí skladovať a prepravovať pri izbovej teplote (20 – 25 °C, 68 – 77 °F).
6. Zabezpečte, aby bola zásielka bezodkladne odovzdaná na transport vodičovi Alpha medical, s. r. o., prípadne zabezpečte jej doručenie do 24 h od odberu krvnej vzorky na adresu:


**Alpha medical, s. r. o.**

**Laboratórium lekárskej genetiky**

**Polianky 7**

**841 01 Bratislava**

**Streck**  
Cell-Free DNA BCT®

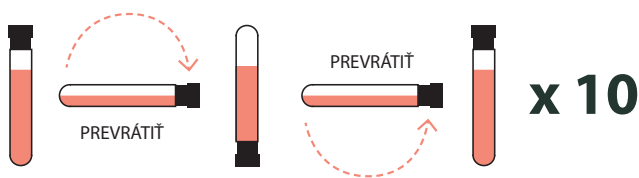

### POZOR: test nie je možné vykonávať, ak:

- má krvná vzorka objem menší než 7 ml,
- skúmavka nie je správne označená,
- žiadanka TOMORROW nie je správne vyplnená a podpísaná lekárom,
- pacientka/zákonný zástupca nepodpísala Poučenie a informovaný súhlas.

Ak chcete nájsť odpovede na najčastejšie otázky, navštívte stránku [www.alphamedical.sk](http://www.alphamedical.sk) alebo [www.tomorrowtest.com](http://www.tomorrowtest.com).

Ak potrebujete viac informácií, pošlite nám e-mail na adresu [nipt@alphamedical.sk](mailto:nipt@alphamedical.sk) alebo volajte **0911 066 079**, prípadne **Call centrum 0850 150 000**, [info@alphamedical.sk](mailto:info@alphamedical.sk)